

STATION LAVE-OEIL Référence : 05560



RESUME

La station lave-œil est un équipement d'urgence permettant à un individu ayant eu une projection de particules solides dans les yeux, telles que de la poussière ou encore de la sciure, d'évacuer le corps étranger de l'œil rapidement. Conformément au Code du travail, chaque lieu de travail doit avoir à sa disposition le matériel d'urgence nécessaire aux risques du secteur.

Elle est fournie avec 2 flacons de 250 ml ou 500 ml de sérum physiologique stérile.

Les points forts :

- Utilisation rapide et facile
- Petit format
- Conforme au Code du travail



DECLINAISONS

Conditionnement

2 Flacons de 250 ml
2 Flacons de 500 ml

DESCRIPTION

Description de la station lavage oculaire

La station lave-œil se compose de 2 flacons de sérum physiologique de 250 ml ou de 500 ml. Elle se fixe au mur grâce aux vis et chevilles livrées avec. Un miroir est présent au centre

de la station afin de faciliter le nettoyage de l'œil. Les flacons sont préservés de la poussière grâce aux protections en plastique présentes sur les œillères des flacons. Son petit format permet d'être placé à proximité des zones les plus susceptibles de causer un accident. Une [signalétique adaptée](#), qui est livrée avec la station, doit être placée au-dessus de celle-ci pour informer tous les salariés de la présence de ce matériel de secours.

Ce genre d'équipement est indispensable pour les locaux ayant des activités qui produisent ou sont en contact avec de la poussière telles que les scieries, les garages ou encore les industries en générales. Pour être conforme à l'article 4224-14 du Code du travail, vous devez avoir une [trousse de secours universelle](#) ou bien une [armoire à pharmacie pour entreprise](#) qui contiennent les indispensables du premiers secours comme des pansements.

Utilisation du lave-œil

Un rince-œil permet à toute personne ayant reçu une projection de particules solides dans l'œil de les éliminer en nettoyant ce dernier à l'aide de sérum physiologique. Nous vous proposons une station de lave-œil qui se fixe au mur pour faciliter la prise en main du flacon, ce qui permet de diminuer le temps d'intervention et ainsi de réduire les conséquences de l'accident sur la victime.

Pour utiliser le lave-œil, vous devez retirer le flacon de son support et placer l'œillère directement sur l'œil en le gardant ouvert grâce au pouce et à l'index pour garantir l'écoulement dans ce dernier. Si la victime porte des lentilles, elle doit les retirer avant d'utiliser le rince-œil. Pressez le flacon jusqu'à ce que la totalité du liquide soit sortie. Grâce à la présence de deux flacons, il est possible de les utiliser en simultané sur les deux yeux ou sur deux salariés différents. Une fois que les flacons sont ouverts, il n'est plus possible de les garder car ils ne sont plus stériles. Vous devez alors les jeter, même si vous n'avez pas utilisé la totalité du liquide.

N'oubliez pas de contacter le Samu au plus vite pour les informer de l'accident. Il est recommandé de consulter un ophtalmologue rapidement après l'accident.

Attention, ces flacons de rince-œil ne sont pas prévus pour une projection de produits chimiques, mais seulement pour les projections de poussière ou encore de plastique.

Caractéristiques du rince-œil mural

Modèle avec 2 flacons de 250 ml :

- Dimensions : 400 x 300 x 70 mm
- Poids : 1,17 kg

Modèle avec 2 flacons de 500 ml :

- Dimensions : 400 x 300 x 100 mm
- Poids : 1,72 kg