

DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION SCHILLER

Référence : 07143



RESUME

Le défibrillateur de formation schiller permet de former l'utilisateur d'un défibrillateur automatisé externe de façon réaliste.

Il possède 3 scénarios afin de simuler différentes situations de réanimation. De plus, il possède deux modes de fonctionnement : automatique et semi-automatique.

Cet appareil est réservé uniquement à la formation. Cela inclut l'apprentissage de la manière de positionner les électrodes, de suivre les instructions vocales, et de délivrer un choc électrique si nécessaire.

Le DAE de formation possède 1 paire d'électrodes autocollantes, 1 câble réutilisable pour électrodes de formation, 1 batterie et 4 pile 1,5 volts LR06.

Les points forts :

- Garantie 1 an
- Interface graphique
- 3 scénarios de formation disponibles
- Livraison gratuite



DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un défibrillateur de formation schiller ?

Un défibrillateur de formation schiller est un dispositif médical conçu pour simuler le fonctionnement d'un défibrillateur automatique externe (DAE). Il est utilisé à des fins pédagogiques pour former les personnes à l'utilisation appropriée d'un [DAE entièrement automatique fabriqué en France](#) ou un [DAE semi-automatique avec instruction vocales](#).

Ce dernier possède 3 scénarios permettant de simuler différentes situations de réanimation :

- Chocs toujours recommandés
- Chocs jamais recommandés
- Chocs recommandés suivi de chocs non recommandés

Il possède deux modes de fonctionnement : automatique et semi-automatique. Le dae de formation possède une interface graphique qui accompagne l'utilisateur tout au long de la simulation de chaîne de survie (massage cardiaque et défibrillation).

Afin d'éviter tout risque pour les usagers, le défibrillateur de formation est sans haute tension. Hormis cela, il fonctionne exactement de la même manière que le DAE FRED PA-1.

Il est programmable à distance via l'application bluetooth "Defi training" disponible sur App Store ou Google Play.

Attention : l'appareil de formation est destiné uniquement à un usage dans le cadre d'une formation secouriste. Il ne doit pas être considéré comme un défibrillateur automatisé externe.

Pour la formation, vous pouvez utiliser un [mannequin de](#)

[formation secourisme avec LED.](#)

Vous transportez le défibrillateur, vous pouvez utiliser une [sacoche de transport pour défibrillateur](#) ou une [mallette rigide pour DAE](#) si vous travaillez dans un chantier.

L'utilisation d'accessoires DAE de marques autres que SCHILLER se fera sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.

Retrouvez tous nos [DAE entièrement automatique et semi automatique](#) sur notre site.

Caractéristiques techniques du défibrillateur trainer

Dimensions (H x l x P) : 310 x 255 x 100 mm

Poids : 2.27 kg

Composition du pack :

- 1 jeu d'électrodes autocollantes
- 1 câble réutilisable pour électrodes de formation
- 1 batterie factice pour FRED PA-1 Trainer
- 1 jeu de 4 pile 1,5 volts LR06

Alimentation : 4 piles LR6 (fournies)

Compatibilité : mannequin RCP