

BOITIER DÉFIBRILLATEUR EXTÉRIEUR AIVIA 200 AVEC ALARME

Référence : 07159



RESUME

Le boîtier défibrillateur AIVIA 200 avec alarme peut être installé en intérieur comme en extérieur. L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme sonore et alarme visuelle (leds rouges clignotantes) afin d'alerter le maximum de monde autour de la victime.

De dimensions H. 42,3 x l. 38,8 x P. 20,1 cm, il est fabriqué en polycarbonate et en ABS qui sont connus pour leur résistance aux chocs et aux UV.

Grâce à ses fonctions de chauffage et de ventilations, ce dernier peut supporter des températures entre -22 °C et 55 °C.

Le boîtier DAE fonctionne avec une [alimentation sur secteur en 24 volts](#) (Très Basse Tension Sécurité) qui n'est pas fournie.

Les points forts :

- Robustesse
- Éclairage jour/nuit
- Compatible avec tous les DAE
- Protégé par des scellés



DESCRIPTION

Pourquoi installer un boîtier défibrillateur extérieur Aivia 200 ?

Le boîtier défibrillateur Aivia 200 est parfait pour stocker et protéger les défibrillateurs dans des environnements extérieur ou intérieur sujets à des températures extrêmes. L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme sonore (80 dB) et l'allumage de LEDS clignotants rouges.

Ce dernier est compatible avec tous les DAE autorisés par la réglementation française comme le [défibrillateur entièrement automatique grand public](#) et le [défibrillateur semi-automatique pour ERP](#).

De plus, il dispose d'une interface graphique qui rappelle les trois gestes à suivre pour faire face à un arrêt cardiaque.

Pour une protection maximale, le DAE possède des scellés plastifiés d'ouverture.

L'armoire pour défibrillateur est composée de deux parties distinctes :

- Le capot en polycarbonate
- Le support en ABS

Ces matériaux sont connus pour leur robustesse et leur résistance aux chocs.

L'armoire défibrillateur AIVIA 200 possède une fonction de détection automatique de luminosité qui permet un bon éclairage en cas de faible luminosité.

Retrouvez l'ensemble de nos [défibrillateurs DSA et DEA](#) et ses accessoires.

Où installer l'armoire pour défibrillateur Aivia 200 ?

L'alimentation sur secteur (24 volts DC) permet l'installation du chauffage et de ce fait permet son installation à l'extérieur où les températures peuvent être négatives, sur la voie publique par exemple. Le chauffage s'active automatiquement lorsque les températures passent en dessous de 10 °C.

Le boîtier DAE possède également une fonction de ventilation permettant de réduire considérablement la température à l'intérieur de ce dernier : ainsi, il protège le défibrillateur de la chaleur excessive lors d'une canicule par exemple.

Attention : il est nécessaire de positionner le boîtier défibrillateur à l'ombre au risque d'exposer le défibrillateur à des températures excessives dues aux rayonnements du soleil.

Ainsi, grâce à ses fonctions de ventilation et du chauffage, l'armoire défibrillateur Aivia 200 peut supporter des températures comprises entre -22 °C et 55 °C.

Signalisez la présence du support défibrillateur avec un [panneau défibrillateur avec direction](#).

Consultez notre article de blog pour en savoir sur l'[utilisation d'un défibrillateur et ses normes](#).

Comment installer le boîtier DAE ?

L'armoire doit être alimentée sur secteur en 24 VDC avec un [adaptateur secteur 24V](#) qui n'est pas fourni. Toutes les instructions concernant l'installation électrique sont indiquées dans le manuel. Demander à un technicien agréé d'installer l'armoire et son alimentation :

- Utilisez le gabarit de perçage fourni pour marquer les trous de fixation sur le mur.
- Fixer l'armoire AIVIA par les trois trous de fixation. Vous devez utiliser une cheville, des vis de fixation (M6 minimum et M8 maximum). La fixation doit pouvoir supporter une charge minimale de 20 kg.

Il faut ensuite brancher l'alimentation à l'armoire :

- Pour cela, dévissez la vis de fixation de la trappe avec un tournevis cruciforme
- passez les câbles d'alimentation dans le passage de câble
- Connectez les câbles sur le bornier d'alimentation
- Branchez le bornier sur le connecteur d'alimentation
- Vérifier que les voyants d'alerte rouges clignotent afin de vous assurer du bon fonctionnement de l'alarme.

Pour une installation en extérieur, un prérequis électrique est nécessaire avant l'installation. Installé dans de mauvaises conditions, le défibrillateur risque de chauffer et de ne plus fonctionner correctement. De plus, les électrodes risquent de ne pas adhérer sur la victime.

Retrouvez également nos boîtiers pour intérieur : l'[armoire AIVIA IN compatible avec tous les DAE](#) et l'[armoire en métal avec vitre acrylique](#).

Caractéristiques techniques

Dimensions :

- Hauteur : 42,3 cm
- Largeur : 38,8 cm
- Profondeur : 20,1 cm

Poids : 3,5 kg

Humidité maximale : 95 %

Matière :

- ABS
- Polycarbonate

Alimentation : 24 VDC